

CMT Disinfection Wipes (1/2)

Toelatingsnummer: 14019N

Product

CMT Disinfection Wipes zijn gebruiksklare alcoholhoudende doekjes, ze bevatten Ethanol en Isopropyl Alcohol. CMT Disinfection Wipes zijn toegelaten door het CTGB onder nr. 14019N en kunnen worden gebruikt als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakken en materialen.

Toepassing

De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het desinfecteren van kleine, harde oppervlakken (max. 0,5 m²), die voor het behandelen schoon zijn gemaakt. Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken die alcoholbestendig zijn, zoals thermometervoelers, tiptoetsen, telefoons, handgrepen, deurklinken, toiletkranen, toiletbrillen, keyboards, kastgrepen, messen en tangen. CMT Disinfection Wipes kunnen worden ingezet op oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.

Werkzaamheidstesten

CMT Disinfection Wipes alcoholhoudende doekjes zijn getest volgens:


- EN 1650:2008
- EN 1276:2009
- EN 14476
- Testrapporten op verzoek opvraagbaar

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakken materialen (tot ca. 0,5 m²) in:

- Grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelensector
- Dierenartsenpraktijken
- Wellness sector
- Laboratoria
- Cleanrooms
- Ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg

De productinformatie van dit product is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van dit product dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in de praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van dit product niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

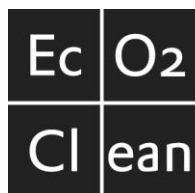

CMT Disinfection Wipes (2/2)

Gebruik

De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het desinfecteren van kleine, harde oppervlakken (max 0,5m²), die voor het behandelen schoon zijn gemaakt. Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken die alcoholbestendig zijn.

Werkwijze

Te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen en het oppervlak drogen met disposable papier. Het te desinfecteren droge oppervlak bevochtigen met de CT Disinfection Wipe door al wrijvend enige druk op het doekje uit te oefenen. Zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Voor optimale desinfectie en ter voorkoming van kruisbesmetting, elk doekje slechts 1 keer gebruiken. Na behandeling het oppervlak aan de lucht laten drogen. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Dosering

Gebruik zoveel CMT Disinfection Wipes doekjes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven – 1 doekje is geschikt voor maximaal 0,06 m² oppervlak. Minimale inwerktijd: 30 seconden.

De productinformatie van dit product is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van dit product dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in de praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van dit product niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.